

# schülke →



Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi kombinace KAS a aminu, určený pro dezinfekci a mytí ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

Na citlivé  
povrchy

## terralin® protect

### Naše Plus

- Bez obsahu aldehydů
- Výborné čisticí vlastnosti
- Použití také ve špatně větratelných místech
- Vhodný k dezinfekci vodoléčebných van

### Oblast použití

**terralin® protect** je vhodný pro dezinfekci a čištění ploch a povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků ve všech prostorách zdravotnických zařízení (vč. operačních sálů, JIP, neonatalogie). Je vhodný také na citlivé plasty (akryláty, plexi).

### Účinnost

Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Polyoma SV40 / Noro / Rota, tuberkulocidní, fungicidní  
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

### Návod na použití

**terralin® protect** se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Nemíchejte s žádnými jinými čisticími či dezinfekčními přípravky. Není vhodný na finální dezinfekci kritických a semikritických zdravotnických prostředků

CE 0297



## Složení

100 g přípravku terralin<sup>®</sup> protect obsahuje následující aktivní látky:

- 22 g Benzalkonium chloride
- 17 g Phenoxyethanol
- 0,9 g Aminoalkylglycine

### Další složení:

5-15% neionogenní povrchově aktivní látky, parfém

### Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	zelený
Dynamická viskozita	cca. 21 mPa*s / 20 °C / Metoda : ISO 3219
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,01 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	8,6 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	48 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

## Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Mísení s jinými produkty může mít negativní vliv na účinnost produktu. Při používání přípravku doporučujeme nosit rukavice.

Doba expirace: 36 měsíců

## Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Terralin protect 2l	5/Karton	181605
Terralin protect 5l	1/Kanistr	181688

## Související přípravky

- desam<sup>®</sup> effekt

## Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

## Typ přípravku

Zdravotnický prostředek tř. IIa



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

**Distributor**  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
www.schulke.cz  
schulkecz@schuelke.com

**Výrobce**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com