



Návod k použití

[**Název výrobku**] Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice [Model] KDNG02M

[**Velikosti**] S/M/L/XL

[**Vlastnosti**] Nepudrované, na levou a pravou ruku.

[**Popis výrobku**] Vyrobeny z nitrilu, jsou dostatečně silné a představují účinnou ochranu. Dodávají se nesterilní, určeno na jednorázové použití.

[**Zamýšlené použití**] Používají je lékaři pro vyšetření nebo kontaktní vyšetření stavu pacienta.


[**Způsob použití**] Před nasazením rukavic odstraňte veškeré ozdoby rukou, ostříhejte a pilníkem zarovnejte nehty, aby nebyly ostré. Dodržujte obecné normy chirurgické dezinfekce. Ruce si umyjte, dezinfikujte a osušte. Používejte rukavice podle velikosti ruky. Rukavice nasazujte na suché ruce, na vlhké ruce se nasazují obtížněji.

[**Pozor**] 1. Nenoste rukavice na ruku s prsteny nebo jinými šperky, nehty udržujte ostříhané a opilované, aby nebyly ostré. 2. Volte prosím rukavice podle vaší velikosti ruky. 3. Nepoužívejte rukavice kontaminované z důvodu poškození obalu. 4. Tento výrobek je určen na jednorázové použití, po použití jej prosím zlikvidujte. 5. Je přísně zakázán kontakt s oleji, kyselinami, alkáliemi, mědí, manganem a dalšími materiály, chemikáliemi a léčivy, které poškozují gumu. 6. Příliš vysoká teplota je pro nitrilové rukavice ničivá.


[**Skladovací podmínky**] Skladujte na chladném, suchém, větraném, tmavém místě v nekorozivní.

[**Skladovatelnost**] 4 roky, datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.


[**Dovozce**] Rihacek s.r.o., Stránského 11, 616 00 Brno, Česká republika, www.rihacek.cz.

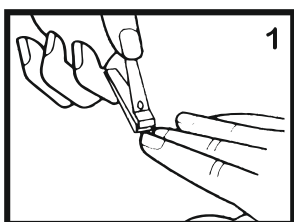

Před použitím rukavic si ostříhejte nehty, příliš dlouhé nebo ostré nehty na prstech rukou mohou rukavice snadno poškodit.

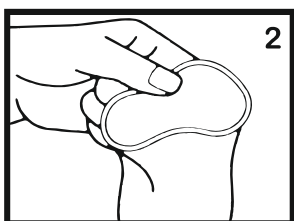

Před použitím rukavic odstraňte drsnou kůži z prstů, aby se rukavice nepoškrábaly.

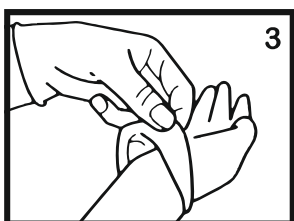

Při svlékání uchopte rukavice za konec na zápěstí a stahujte směrem k prstům, nikdy netahejte za špičky prstů rukavic.

