



ORO CLEAN® Liquid

Vysoce účinný čisticí prostředek pro šetrné, ale důkladné čištění dentálních odsávacích systémů.



- ▶ Vynikající čistící síla
- ▶ Nepěňivé složení
- ▶ Použití koncentrace 2 %
- ▶ Maximální nákladová efektivita
- ▶ Jednoduchá aplikace

ORO CLEAN® Liquid je vysoce účinný koncentrát pro čištění odsávacích zařízení, plivátek a odlučovačů amalgámu. Díky vyvážené kombinaci účinných látek se tento produkt vyznačuje vysokou čistící schopností a působí i proti zatvrdlým zbytkům jako je vápník, krev a jiné sedimenty. ORO CLEAN® Liquid nepění.

Předmět použití



- ▶ Pro čištění sacích jednotek, plivátek a amalgámových separátorů




Použití



Pro čištění použijte jako vodný roztok podle dávkování. Po ukončení chirurgického zákroku před provedením dezinfekce sací jednotku důkladně propláchněte vodou. Pro čištění si připravte 2 litry pracovního roztoků dle pokynů na etiketě. Pro odměření přesného koncentračního množství použijte víčko. Odsajte 1,5 litru pracovního roztoku pomocí OROCLEAN® Cup a nalijte zbývajících 500ml do plivátkové mísy. Nechte působit po dobu 30 minut. Po čištění důkladně opláchněte vodou.

Dávkování

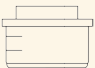

	 Koncentrát	+	 Voda	 Čas
2%	40 ml	+	1960 ml	30 min





Kompatibilita



Polyethylen	Kompatibilní.
Polypropylen	Kompatibilní.
Polytetrafluoethylen	Kompatibilní.
Polyvinylchlorid (měkký)	Kompatibilní.
Silikonová pryž	Kompatibilní.
Pryž	Kompatibilní.
Litina	Kompatibilní.
Hliník	Nekompatibilní.
Měď	Nekompatibilní.
Mosaz	Nekompatibilní.

Varování



H290 Může být korozivní pro kovy. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je možné je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnými pravidly.



100 g obsahuje



Alkalické čisticí sloučeniny, protipěnicí činidla, speciální povrchově aktivní látky

Fyzikální vlastnosti



Skupenství:	Čirá, neviskózní kapalina
Barva:	Žlutý
Vůně:	Máta peprná
Hodnota pH:	12.5-14.0
Doba použitelnosti:	36 měsíců (neotevřený obal) Neuplatňuje se. (použitý pracovní roztok)

Balení



250 ml lahev, 2 l lahev s odměrkou, 5 l kanystř

Váš distributor



 Schafferová

SCHAFFEROVÁ spol. s r. o.
 Andelská 29
 77900 Olomouc
 Česká republika
 Telefon: +420 585 757 200
 Fax: +420 585 757 209
 info@schafferova.cz
 www.schafferova.cz
 www.facebook.com/schafferova