



ORO CLEAN® Plus

Širokospektrý dezinfekční koncentrát pro dezinfekci, čištění a deodorizaci všech dentálních odsávacích zařízení.

- ▶ **Dlouhodobá studie**
- ▶ **Nepěnivý**
- ▶ **Použití koncentrace 2 %**
- ▶ **Maximální nákladová efektivita**
- ▶ **Jednoduchá aplikace**

ORO CLEAN® Plus je vysoce účinný koncentrát pro dezinfekci a čištění odsávacích zařízení, plivátek a odlučovačů amalgámu. Účinná kombinace čistících a dezinfekčních složek efektivně odstraňuje biofilm a umožňuje tak bezproblémový provoz zařízení. ORO CLEAN® Plus se vyznačuje příjemnou mentolovou vůní. Přípravek nepění.

Předmět použití



- ▶ Pro dezinfekci a čištění sacích jednotek, plivátek a amalgámových separátorů

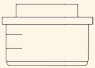
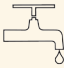

Použití



Pro čištění použijte jako vodný roztok podle dávkování. Po ukončení chirurgického zákroku před provedením dezinfekce sací jednotku důkladně propláchněte vodou. Pro dezinfekci si připravte 2 litry pracovního roztoku dle pokynů na etiketě. Pro odměření přesného množství koncentráту použijte víčko. Odsajte 1,5 litru pracovního roztoku pomocí OROCLEAN® Cup a nalijte zbyvajících 500ml do plivátkové mísy. Nechte působit po dobu 30 minut. Po čištění důkladně opláchněte vodou.

Dávkování



	 Koncentrát	+	 Voda	 Čas
2%	40 ml	+	1960 ml	30 min



Spektrum účinnosti / doba expozice



Baktericidní	2% v 30 min
Protikvasinkový	2% v 30 min
Virus hepatitidy B	2% v 30 min
Virus hepatitidy C	2% v 5 min
HIV	2% v 30 min

V souladu s Standardní metody DGHM, EN 1040, EN 1275, RKI / DVV pokyny.





Kompatibilita



Polyethylen	Kompatibilní.
Polypropylen	Kompatibilní.
Polytetrafluoethylen	Kompatibilní.
Litina	Kompatibilní.
Hliník	Kompatibilní s omezeními.

Nebezpečí



H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě odstraňte/svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je možné je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P391 Uniklý produkt sesbírejte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnými pravidly.



100 g obsahuje



5 g benzalkoniumchlorid, protipěnicí činidla, speciální povrchově aktivní látky

Fyzikální vlastnosti



Skupenství:	Čirá, slabě viskózní kapalina
Barva:	Žlutý
Vůně:	Aromatická
Hodnota pH:	10.0-12.0
Doba použitelnosti:	36 měsíců (neotevřený obal) Neuplatňuje se. (použitý pracovní roztok)

Balení



250 ml lahev, 2 l lahev s odměrkou, 5 l kanystr

Váš distributor



 Schafferová

SCHAFFEROVÁ spol. s r. o.
 Andelská 29
 77900 Olomouc
 Česká republika
 Telefon: +420 585 757 200
 Fax: +420 585 757 209
 info@schafferova.cz
 www.schafferova.cz
 www.facebook.com/schafferova