



OROLIN-Multisept® Plus

Silný koncentrát pro rychlou dezinfekci lékařských a chirurgických nástrojů

- ▶ **Vhodný pro použití v ultrazvukovém čisticím přístroji**
- ▶ **Plně virucidní během 15 minut**
- ▶ **Koncentrát s vysokým výtěžkem**
- ▶ **Silný čisticí prostředek**
- ▶ **Vysoká kompatibilita materiálu**

OROLIN® Multisept Plus je silný koncentrát pro ruční dezinfekci a čištění lékařských a chirurgických nástrojů. V roztoku je baktericidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, antikvasinkové a virucidní během 15 minut. Jedinečná formulace obsahuje silné inhibitory koroze, které dají ve výsledku roztok mnohem méně korozivní než je voda pro slitiny mědi, pro železo a cín. Proto také nedochází k žádnému zbarvení materiálů, případně k fixaci krve nebo bílkovin na nástrojích. Testy prokázaly snášenlivost s nerezovou ocelí a většinou nekovových materiálů včetně akrylátového skla, Plexiglas®, polyamidů, polyethylenu, PVC a silikonu. OROLIN® Multisept Plus neobsahuje aldehydy, fenoly ani chlor. Vhodný pro použití v ultrazvukovém čisticím přístroji.

Předmět použití



- ▶ Pro manuální dezinfekci a čištění lékařských nástrojů, vrtáčků a všech endodontických nástrojů, včetně skalpelů, stomatologických vyšetřovacích nástrojů, kleští, lžic, svorek, škrabek, mikronástrojů, lopatek, pilníků, kyret a sond


Použití



Pro dezinfekci nástrojů ponořením použijte vodný roztok žádané koncentrace. Pro odměření přesného množství použijte spodní značku (20 ml) nebo horní značku (40 ml) uvnitř víčka. Vložte nástroje a dbejte na úplné ponoření. Vzduch musí zcela uniknout ze všech dutých prostor, případné klouby je třeba otevřít. Dodržte dobu expozice. Následně důkladně omyjte nástroje dostatečným množstvím vody. V závislosti na stupni znečištění vyměňujte roztok dvakrát až třikrát týdně. Doporučujeme denní výměnu lázně. Roztok může být užíván maximálně po dobu 7 dnů. Pozor, přípravek není kompatibilní s hliníkem, galvanizovanou ocelí, polyurethanem a fluoropolymerem.

Dávkování



	 Koncentrát	+	 Voda	 Čas
2%	20 ml	+	980 ml	5 min

Spektrum účinnosti / doba expozice



Baktericidní	2% v 5 min
Bakterie odolné vůči antibiotikům	2% v 5 min
Tuberkulocidní	2% v 5 min
Mykobaktericidní	2% v 5 min
Protikvasinkový	2% v 5 min
Kvasinky odolné vůči antibiotikům	2% v 5 min
Obalené viry	2% v 5 min
BVDV	2% v 5 min
Koronavirus	2% v 5 min
Virus hepatitidy B	2% v 5 min
Virus hepatitidy C	2% v 5 min
Virus herpes simplex	2% v 5 min
HIV	2% v 5 min
Virus chřipky typu A	2% v 5 min
Virus vakcinie	2% v 5 min
Neobalené viry	2% v 15 min
Adenovirus	2% v 5 min
Norovirus	2% v 10 min
Poliovirus	2% v 15 min

V souladu s Standardní metody DGHM, EN 1040, EN 1275, EN 1650, EN 1657, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, RKI / DVV pokyny.





Kompatibilita



Polyethylen	Kompatibilní.
Polypropylen	Kompatibilní.
Polytetrafluoethylen	Kompatibilní.
Silikonová pryž	Kompatibilní s omezeními.
Plexisklo	Kompatibilní.
Litina	Kompatibilní s omezeními.
Hliník	Nekompatibilní.
Ocel	Kompatibilní.
Měď	Kompatibilní s omezeními.

Nebezpečí



H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H373 Při prodloužené nebo opakované expozici požíváním může způsobit poškození ledvin. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě odstraňte/svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je možné je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnými pravidly.



100 g obsahuje



3,6 g dialkyldimethylamoniumchlorid,
9,1 g alkylamin, prostředky posilující
čisticí efekt, pomocné látky

Fyzikální vlastnosti



Skupenství:	Čirá, slabě viskózní kapalina
Barva:	Modrá
Vůně:	Aromatická
Hodnota pH:	11.5-13.0
Doba použitelnosti:	24 měsíců

Balení



1 l láhev s odměrkou,
2 l láhev s odměrkou, 5 l kanistr

Váš distributor



 Schafferová

SCHAFFEROVÁ spol. s r. o.
Andelská 29
77900 Olomouc
Česká republika
Telefon: +420 585 757 200
Fax: +420 585 757 209
info@schafferova.cz
www.schafferova.cz
www.facebook.com/schafferova

CE
1250